

치과용 도포기

모델명 : Disposable Brushes

#Small, #Medium, #Large

품목신고번호 : 대전 수신 11-25호

4) 사용도중 변형이나 이물질 등이 발견되었을 경우 즉시 사용을 중단하고 다른 기구로 대체하여 사용한다.

사용 목적

치과 재료를 외용으로 도포 하기 위해 사용하는 기구

사용 방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 보관 중인 Disposable Brushes는 사용하기 위한 청결 상태를 유지하는지 확인한다.
- 2) 사용 전에 외관상 현저한 변형이나, 이물질 부착 등을 확인하여야 한다.

2. 사용방법

- 1) 시술에 따른 Disposable Brushes의 Size를 선택하며, 쉽게 도포하기 위해 제품의 클리핑된 바로 윗부분을 90°로 구부려 올린 후 사용하고자는 치과 재료를 Head 부분에 묻혀 도포 한다.
- 2) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
- 3) 바닥에 떨어뜨렸을 경우, 다른 기구로 대체하여 사용한다.

사용시 주의사항

1. 사용할 때 주의사항
 - 1) 제품의 Size 및 용도에 맞게 사용할 것
 - 2) 일회용 제품으로써 재사용 하지 말 것
2. 보관조건 혹은 저장방법

저장방법 : 실온보관

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 080-080-4183

- 수입업자 : ㈜다디아덴트
 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 16
 전화 : 043-266-2315
 팩스 : 043-262-8658
 이메일 : diadent@diadent.co.kr
 홈페이지 : WWW.DIADENT.CO.KR

- 제조국 및 제조사명 :
 중국, Tribest Dental Products Co.,Ltd.