

근관 치료용 수동용 파일리머

모델명 : K-File, Hedstrom File, Reamer
K-File(Nickel-Titanium),
H-File(Nickel-Titanium),
Reamer(Nickel-Titanium)

품목신고번호 : 제신 21-1127호

사 용 목 적

수동으로 근관 내의 신경을 제거하거나
근관을 확대하는 기구

사 용 방 법**1. 사용 전 준비사항**

비멸균 제품으로 사용 전에 반드시 멸균을
실시하여야 한다.

[권장 멸균방법] 오토클레이브 134℃,
18분 이상 멸균 후 건조한다.

2. 사용방법

File를 사용하여 근관을 형성할 때, 먼저
작은 Size의 File를 사용하여 근관을
형성한 후 다음에는 위 단계의 File를
사용하여 동일한 근관을 조금씩 확대
형성한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 고온 다습한 환경, 직사광선 피하고 실온에
보관한다.
- 2) 사용 후 이물질을 물로 제거한 후 Enzymatic
detergent로 초음파 세척을 실시한다.
- 3) 세척된 제품은 건조(열풍건조 : 90℃, 20분)
한 후 청결하게 보관한다.

사용시 주의사항**1. 경 고**

본 제품은 Stainless Steel 또는 Nickel
합금이 포함되어 있으며, 금속성 알레르기
또는 민감성을 가진 환자에게는 사용하지
마십시오.

2. 일반적 주의

- 1) 치과전문가에 의해 사용되어야 하며,
사용방법, 사용상의 주의사항을
준수하여야 한다.
- 2) 치과용으로만 사용하여야 한다.

3. 사용 시 주의사항

비멸균으로, 반드시 사용 전에 멸균을
하도록 한다.

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 080-080-4183

- 제조의뢰자 : (주)다디아덴트

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 16

전화 : 043-266-2315

팩스 : 043-262-8658

이메일 : diadent@diadent.co.kr

홈페이지 : WWW.DIADENT.CO.KR

- 제조자 :

Shenzhen Superline Technology Co., Ltd.
Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan community,
Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China